


sonic[®] SOUND

Gehoorversterker



Uw hoorhulp overzicht

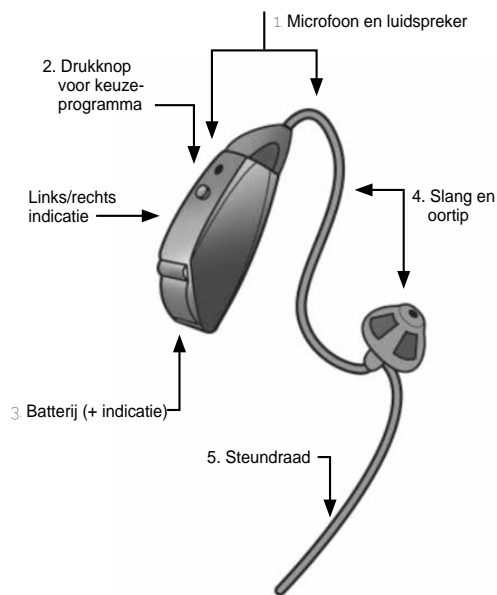

- 1. Microfoon en luidspreker:** Geluid komt via de microfoon uw Sonic Sound binnen. Het versterkte geluid komt via de luidspreker en het slangetje uw oor binnen.
- 2. Drukknop:** Druk om te schakelen naar het volgende programma.
- 3. Batterijlade:** Deze lade bevat de batterij en functioneert als aan-/uit-schakelaar. (gesloten met batterij is aan, open is uit) in de batterijlade geeft de + de positie van de batterij aan.
- 4. Slang en oortip:** Uw Sonic Sound wordt geleverd met standaard slang en tip. Het versterkte geluid wordt hiermee in uw oor gebracht.
- 5. Steundraad:** Deze houdt de slang en daarmee de Sonic Sound op zijn plaats.



Mocht u nog informatie missen of aanvullende vragen hebben informeer dan bij de leverancier van uw Sonic Sound.

Snelstart

Aan/uit: 	Vervangen batterij: Plus indicator batterij (+)
Lage batterijspanning: 3 toontjes elke 8 minuten	Drukknop functie: drukken voor programmawijziging


Informatie batterij

De Sonic Sound gebruikt een zinklucht batterij type 10. Deze batterij gaat gemiddeld 90 tot 100 uur mee.

Lage batterijspanning:

Bij een te lage batterijspanning geeft uw hoorhulp gedurende een periode elke 8 minuten een serie van 3 dubbele toontjes. Bij een vrijwel lege batterij hoort u een serie van 6 toontjes waarna de Sonic Sound uitschakelt.

Batterij waarschuwing:

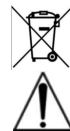


Lever lege batterij altijd gescheiden in

Batterijen nooit inslikken, indien ingeslikt waarschuw direct een arts!

Plaatsen / vervangen van de batterij

- Open voorzichtig het batterijklepje met een vingernagel. Als er een lege batterij in de batterijlade zit, neemt u de batterij uit het vak met uw duim en wijsvinger. Verwijder eventueel eerst de oude batterij.
- Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade met het (+) teken op de batterij aan dezelfde kant als het (+) teken op de batterijlade

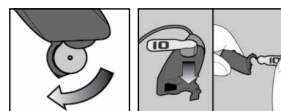

Opmerking: Wacht een paar tellen voor het sluiten van de batterijdeksel nadat plastic lipje is verwijderd. Wanneer de batterijlade niet goed sluit controleer dan of de batterij juist is geplaatst.



Open altijd de batterijlade wanneer de Sonic Sound niet gebruikt wordt om te voorkomen dat de batterij leeg loopt. Daarnaast kan eventueel aanwezig (condens) vocht beter verdampen.

Het aan- en uitzetten van de gehoorversterker

Sonic Sound aan en uitzetten.

- 1. AAN:** Sluit het batterijklepje volledig.
- 2. UIT:** Open het batterijklepje



Opmerking: Het kan enkele seconden duren voor de Sonic Sound inschakelt na het plaatsen van de batterij.



Opmerking: Als de Sonic Sound aangezet wordt en uitgeschakeld wordt, houd dan het toestel tussen duim en wijsvinger en open de lade met de duim van uw andere hand.

Dragen van Sonic Sound

- Houd het slangetje tussen de duim en de wijsvinger. Het uiteinde van de slang moet naar de gehoorgang wijzen met het toestel rustend op de bovenkant van het oor.
- Plaats de Sonic Sound zo over de bovenkant van de oorschelp tot het netjes achter het oor ligt.
- Leg het slangetje over de oorschelp, plaats de tip voor de gehoorgang en druk deze voorzichtig de gehoorgang in. Leg het steundraadje in de oorschelp.



Opmerking: Naar beneden en opzij doen van de oorlel kan helpen bij het plaatsen van het slangetje met tip in de gehoorgang.



De tip moet helemaal of bijna helemaal de gehoorgang worden gezet. Nauwkeurig inzetten van deze tip is belangrijk om genoeg geluid te horen en fluiten te voorkomen.

Als u een bril draagt, zet deze dan eerst op voor u het toestel inzet.



Allergische reacties door materiaal van de Sonic Sound zijn niet aannemelijk. Als u last heeft van huidirritatie, roodheid, of pijn in of naast het oor, neem dan contact op met uw arts of audicien.

Gebruiksaanwijzing

Programma keuze.

De drukknoop geeft de mogelijkheid te kiezen tussen verschillende programma's druk op de knop, een verandering van programma is hoorbaar aan een korte pieptoon.



Gebruik het programma dat voor u het beste klinkt.

Programma	Toon
1 normaal	1 toon
2 harder	2 tonen
3 televisie / vergadering	3 tonen
4 BATTERIJBESPARING	




Opmerking: Wanneer Sonic Sound niet correct geplaatst is kan het een fluittoon geven. Controleer bij fluittonen altijd het slangetje op breuken de plaats van de tip in de gehoorgang.

Distributor / Trust

www.sonic-sound.nl



IntriCon Corporation
1260 Red Fox Road
Arden Hills MN 55112 USA

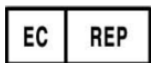

CEpartner4U BV
Esdoorlaan 13, 3951DB Maarn,
The Netherlands

22561 Rev D01 | 09/2014



0086

Onderhoud van uw hoorhulp toestel

Vervangen van de slang en tip:

Sonic Sound wordt geleverd met per oor 2 slangetjes en 4 tips. Vervang de slang na een half jaar en tips iedere 3 maanden.

Verwijderen van de slang en tip:


Houd Sonic Sound stevig vast en draai het slangetje een kwartslag, trek deze van het toestel af. De tip kan eenvoudig van de slang afgetrokken worden.



Opmerking: Buig de slang nooit bij het verwijderen, dit kan de luidspreker uitgang beschadigen.

(Her)plaatsen slang en tip:


Druk voorzichtig de slang vast op de luidsprekeruitgang tot deze vastklikt. De tip kan rechtstandig op de slang worden geschoven.

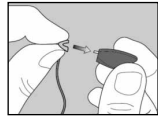

Opmerking: Zorg dat de reinigingsdraad niet in de slang zit wanneer deze wordt bevestigd om beschadigingen te voorkomen.

Schoonmaken van slang en tip:

Tussen het vervangen van de slangetjes door, moet u de slang en tip schoonmaken met de reinigingsdraad en een doekje om vuilen oorsmeer weg te halen.

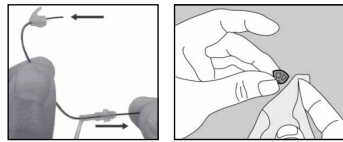

Opmerking over onderhoud

Zorg dat uw Sonic Sound schoon is en niet verstopt raakt door oorsmeer.


- Verwijder de slang.
- Spoel deze met lauwwater en eventueel zeep af.
- Verwijder al het vocht (eventueel even doorblazen).
- Laat het slangetje een nachtje drogen alvorens het terug te plaatsen.
- Wanneer de slang droog is, kan u hem weer aansluiten.
- Reinig Sonic Sound en de tip met een schoon doekje.



Opmerking: De Sonic Sound electronica mag NIET nat worden, verwijder de slang alvorens dezete reinigen!



Opmerking: Gebruik geen alcohol of scherpe voorwerpen voor het schoonmaken van Sonic Sound.

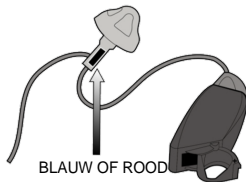

Aanwijzingen voor gebruik van Sonic Sound:



Open de batterijlade wanneer u het niet gebruikt.



Verwijder altijd uw hoorhulp wanneer u haarverzorgingsproducten gebruikt. Het PSAP toestel kan verstopt raken en niet goed functioneren.



Draag uw hoorhulp niet in bad of douche en dompel het toestel niet onder water.



Als uw Sonic Sound wél nat wordt, laat deze dan na het verwijderen van de batterij 24 uur aan de lucht drogen. Verwarm het toestel niet met föhn, oven, verwarming of andere apparatuur!



Bescherm uw Sonic Sound tegen blootstelling aan extreme hitte.



Regelmatig gebruik van een ontvochtiger kan helpen corrosie te voorkomen en verlengt de levensduur van uw Sonic Sound.



Laat uw hoorhulp niet vallen of botsen op/tegen harde oppervlakken.



Opmerking: In het geval van onverwachte werking of gebeurtenissen, neem dan contact op met uw leverancier voor ondersteuning.

Oplossing van problemen

Oorzaak	Mogelijke oplossing
1. Mogelijke oplossing	
Het toestel staat uit	Zet hem aan door de batterijklep te sluiten of verwijder het oorsmeer
Lege of bijna lege batterij	Vervang de batterij
Oorsmeer	Verschoon/vervang slang en tip
Draai hem om	Het plus (+) teken boven
Vochtigheid	Open het batterij klepje en laat drogen
2. Drie dubbele piepjes	
Bijna lege batterij	Vervang de batterij
3. Fluittonen of terugkoppeling	
Tip niet goed geplaatst	Verwijder en plaats opnieuw
Haar of kleren naast het oor	Verplaats het haar of de kleding
Controleren op scheuren in de slang	Verwijder slang en tip
4. Slechte pasvorm	
Toestel valt uit uw oren	Neem contact op met uw leverancier

Service en garantie

Sonic Sound biedt u een uitgebreide, wereldwijde garantie vanaf de aanschafdatum. Vraag uw audicien naar de looptijd van de garantie in het land van aankoop.



Opmerking: Geen garantie zal er worden verleend als uw hoorhulp normale slijtage vertoont, of na onjuiste behandeling, blootstelling aan chemicaliën, onderdompeling in water of overbelasting. In het geval van schade door een derde partij of niet geautoriseerde zaak, is het garantiebeleid nietig. Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door een audicien op zijn of haar werkplek.

Waarschuwingen voor consument



Sonic Sound is een hoorhulp en geen hoortoestel het zal een gemeten gehoorverlies niet revalideren.



Gebruik uw Sonic Sound niet in gebieden met explosiegevaar.



Allergische reacties door Sonic Sound zijn niet aannemelijk. Als u last heeft van huid irritatie, roodheid, of pijn in of naast het oor, neem dan contact op met uw arts of audicien.



Wanneer onverhoopt onderdelen van SonicSound in uw oor achterblijven neem dan direct contact op met uw audicien.



Verwijder Sonic Sound voor CT en MRI scans of voor andere elektromagnetische behandelingen.



Laat nergens uw Sonic Sound achter waar kinderen of huisdieren ze kunnen bereiken. Wanneer batterijen worden ingeslikt, raadpleeg dan uw arts.



Wanneer u pijn in of achter de oren voelt, als huid irritaties of opstoppingen van oorsmeer verschijnen, neem dan contact op met uw audicien.



Sonic Sound met richtmicrofoons verminderen achtergrondgeluid. Wees u ervan bewust dat waarschuwingssignalen of geluiden die van achteren komen, bijvoorbeeld auto's gedeeltelijk worden onderdrukt.

Voorzorgsmaatregelen



Uw Sonic Sound gebruikt de meest moderne materialen en technieken. Toch kunnen andere communicatie middelen zoals een draadloze telefoon in de directe omgeving van uw hoorhulp, een storing creëren. Deze Storing kan op verschillende manieren tegenworden gaan. Schakel over naar een ander programma, draai uw hoofd in een andere richting of plaats de telefoon tegen het andere oor en draai weg van het toestel.

Identificatie van Sonic Sound



Het serienummer en fabricagejaar bevinden zich aan de onderkant van het toestel.



Serienummer: _____

Aanschafdatum: _____

Naleving informatie



Met het CE symbool, bevestigt IntriCon dat dit product –inclusief accessoires– voldoet aan de eisen van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42 / EEG van de Raad, evenals de R & TTE-richtlijn 1999/5 / EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-zenders. De nummers na het CE-symbool komen overeen met de code van de gecertificeerde instellingen die geraadpleegd zijn voor de bovengenoemde richtlijnen.



Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak wijst u erop dat de Sonic Sound niet weggegooid mag worden als normaal huisvuil. Gelieve oude of ongebruikte Sonic Sounds, te behandelen als klein elektronisch afval of lever deze in bij de audicien. Een verantwoorde verwijdering garandeert het milieu en de gezondheid.



CEpartner4U BV
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn,
Nederland



Dit symbool geeft aan dat de in deze gebruiksaanwijzing beschreven producten voldoen aan de eisen voor een toepassing van het type BF van EN 60601-1.



Symbool voor droog houden.



Symbool voor waarschuwing. Dit is een veiligheidsymbool gebruikt om specifieke waarschuwingen aan te duiden of voorzorgsmaatregelen in verband met de apparaten die niet op andere wijze zijn te vinden op het etiket.



Symbool om het uit de zon te houden.



IntriCon Corporation
1260 Red Fox Road
Arden Hills MN 55112 USA



Symbool voor niet steriel.



Symbool voor breekbaar, behandel met zorg.



Gedurende het transport van spullen, mag de relatieve luchtvochtigheid niet voor een lange periode buitende gestelde waarden van 10-95% bedragen.



Het fabricagejaar zijn de eerste 2 nummers in het serienummer (Ga ervan uit dat de productenzijn geproduceerd in de ' 20'; bijv. ' 14'' = 2014).



Gedurende het vervoer van de goederen, mag de temperatuur niet buiten de waarden -10 °C en 70 °C vallen voor een lange periode.



Een luchtdruk tussen 500 en 1100 hPa is gewenst.



Het serie nummer is genoteerd in een 8-cijferige code. De laatste 6 nummers zijn het serie nummer.